

# Gebruiksaanwijzing



**sprizer**



**BELANGRIJK:** Lees deze gebruiksaanwijzing voor het in gebruik nemen van de Sprizer

## Inhoud

Onderdelenoverzicht	3
Veiligheidsaspecten	4
Gebruik	11
Opbergen en Transport	12
Onderhoud en Problemen	15
Technische gegevens	15

# Onderdelenoverzicht


**Rugzak**




**Draagtas**




**Slangen (4+2 reserve)**

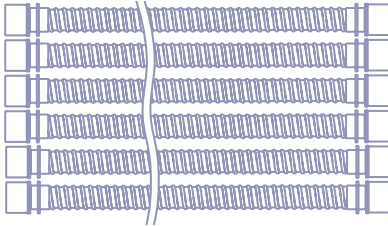


**Pomp**

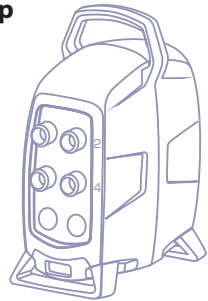


**Luchtmatras**

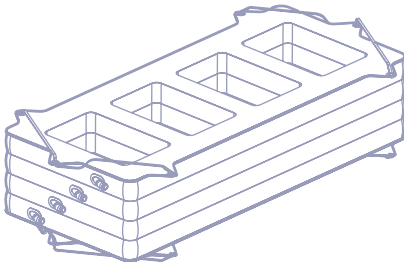

**Netsnoer**

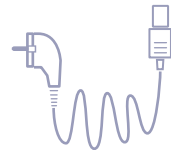

**Afstandsbediening**

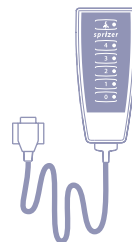

## Veiligheidsaspecten

Gebruik de Sprizer niet bij een belasting groter dan 175 Kg. Ga niet met meer dan twee personen op de luchtmatras liggen of zitten.



Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen i.v.m. beschadigen van de luchtmatras.



Gebruik de Sprizer niet op instabiele bedden.



Gebruik de Sprizer niet bij bedden met openingen in hoofd- of voeteneinde in verband met beknellingsgevaar.



De Sprizer is ontwikkeld voor gebruik in de thuiszorg en de kraamzorg. Het product is NIET geschikt voor gebruik in een ziekenhuis. Alleen in aanwezigheid van een deskundige mag de kraamzorgstand gebruikt worden.

Gebruik geen matrassen dikker dan 20 cm.

Indien er nog vragen zijn, die niet in deze handleiding worden beantwoord, kunt u terecht bij de veelgestelde vragen op de website:

**[www.sprizer.com](http://www.sprizer.com)**


# Installatie

1. Controleer of alle onderdelen van de Sprizer aanwezig zijn.



- 1 x Luchtmatras
- 1 x Pomp
- 4 x Slangen
- 2 x Reserveslangen
- 1 x Afstandsbediening
- 1 x Netsnoer

2. Neem de echte matras van het bed.

3. Leg de luchtmatras op de bedbodem.

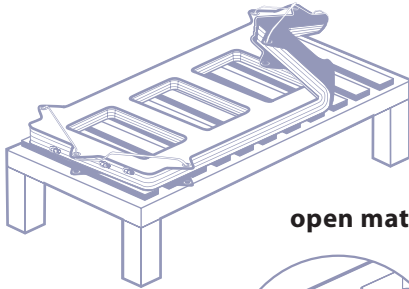

**open matras**

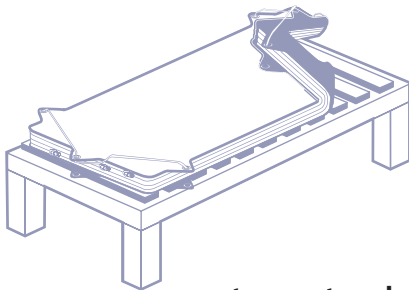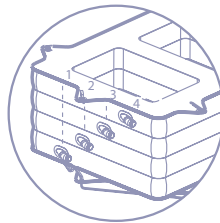


**matras met gesloten  
bovenzijde**

Hou bij het plaatsen van de luchtmatras rekening met de plaats waar de pomp komt te staan. Leg de luchtmatras met de aansluitingen naar de kant van de pomp.

Bij houten bedbodems met splinters, of bij ruwe metalen spiraalbodems wordt geadviseerd een matrasbeschermer of onderdeken te gebruiken.


## Installatie

4. Sluit het netsnoer aan op de pomp.

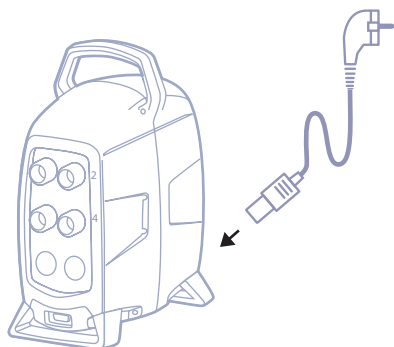

5. Plaats de pomp bij het bed.

Bij een seniorenbed past de pomp eventueel onder het bed.

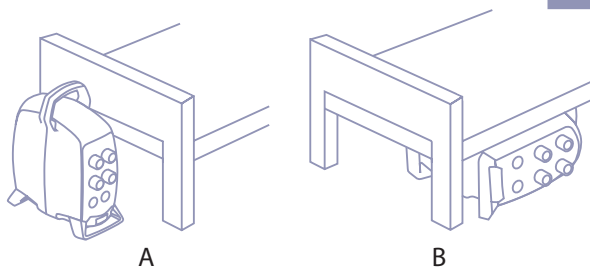




Zet de pomp naast [A] of onder [B] het bed. Leg de pomp nooit op de zijde waar het netsnoer is aangesloten in verband met de aan- en afvoer van lucht.

# Installatie


6. Sluit de slangen aan.

Sluit de slangen één voor één aan volgens [A]: 1e ventiel op de onderste laag van het luchtmatras, 2e ventiel op de 2e laag, enz.

A

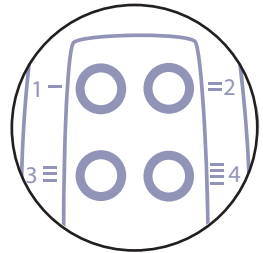
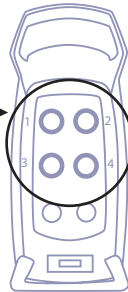
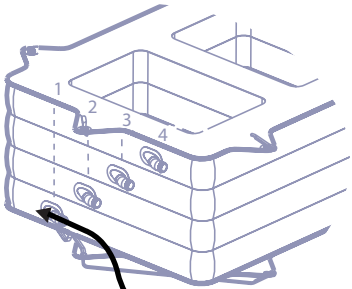


B

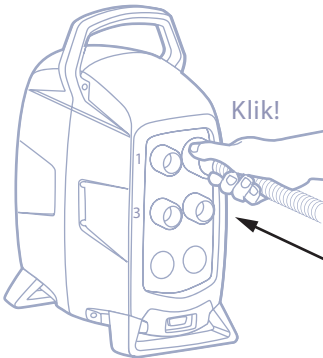


[B] De slangen worden vastgezet met een snelkoppeling. Vastmaken kan door erop te duwen.  
[C] Loskoppelen kan door de ring naar achter te verplaatsen (1) en dan te trekken (2).

C

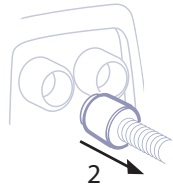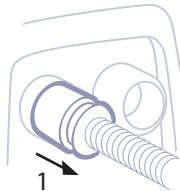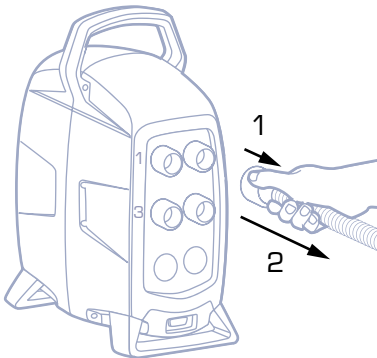

## Installatie

7. Sluit de afstandsbediening aan.

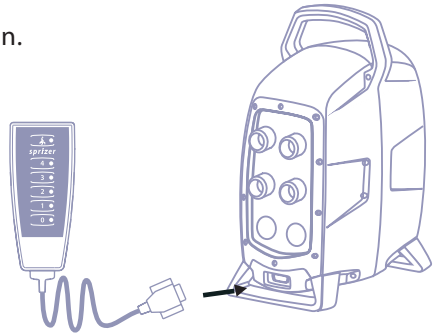


8. Zet de pomp aan middels de aan/uit schakelaar aan de achterkant van de pomp.

9. Controleer de werking van de Sprizer door eerst tot de hoogste stand op te blazen (druk op 4) en vervolgens weer helemaal te laten zakken (druk op 0).

10. Plaats de echte matras op de luchtmatras. Trek de banden van de bovenzijde van de luchtmatras om de hoeken van de matras.

De Sprizer is nu klaar voor gebruik.

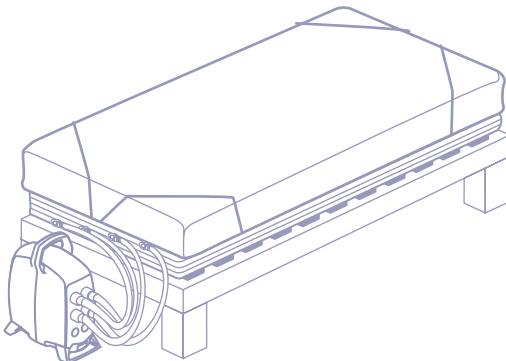

Een nieuwe luchtmatras kan de eerste keer wat moeilijker vullen. Ook kan het voorkomen dat niet alle lagen zich vullen. Laat dan de luchtmatras weer helemaal zakken en blaas hem nogmaals op, totdat de lagen wel volledig gevuld worden. Als de matras vrij omhoog en omlaag kan bewegen is de Sprizer klaar voor gebruik en kunt u het bed weer opmaken.

# Gebruik

## Bediening

U kunt de luchtmatras verstellen door op de afstandsbediening de knop in te drukken met de gewenste hoogte. Het lampje naast de knop zal gaan branden om aan te geven naar welke hoogte de luchtmatras opgeblazen zal worden. Als de Sprizer klaar is zal het lampje blijven branden om te laten zien tot op welke laag de Sprizer is opgeblazen. U kunt de gewenste hoogte tijdens het opblazen altijd bijstellen. De Sprizer is alleen per gehele laag verstelbaar.

LET OP: De Sprizer is beveiligd door maximaal 35 minuten opgeblazen te blijven, waarna de Sprizer vanzelf omlaag gaat naar niveau 0.

## Fluisterstand

U kunt het geluidsniveau van de pomp verminderen door de fluisterstand knop in te drukken. De pomp is dan stiller en het matras vult langzamer.

## Kraamzorgstand


In de kraamzorgstand blijft het matras gevuld en wordt deze om de 30 minuten automatisch bijgevuld. De kraamzorgstand wordt ingesteld door de fluisterstand- en "0"-knop 5 seconden ingedrukt te houden. Na het inschakelen van de kraamzorgstand zal het lampje bij laag 0 blijven knipperen. Om de kraamzorgstand uit te schakelen moeten de fluisterstand- en "0"-knop 5 seconden ingedrukt worden.



## Gebruik


### De verzorgtaak

Om rug-, schouder- en nekkachten te voorkomen kunt u de cliënt op een prettige werkhoogte brengen. Kies een voor u gezonde en prettige werkhoogte; bijvoorbeeld laag 3 of 4.

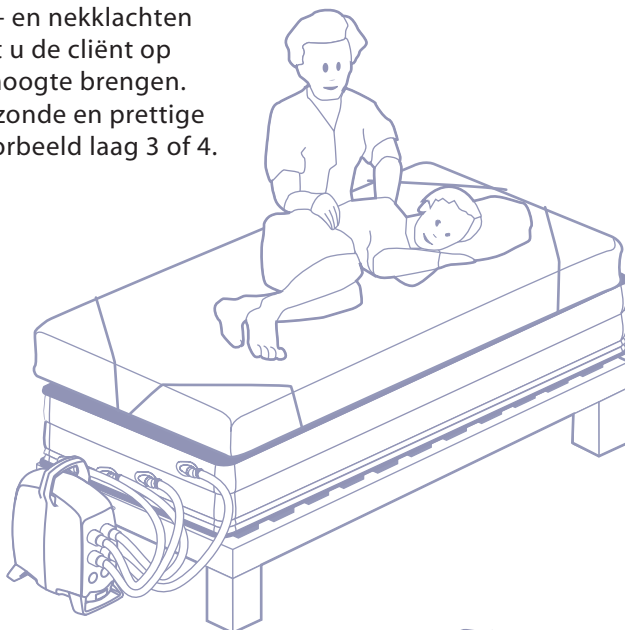

### Gemakkelijker uit bed


Door de luchtmatras omhoog te brengen naar laag 1 wordt het gemakkelijker om uit bed op te staan.

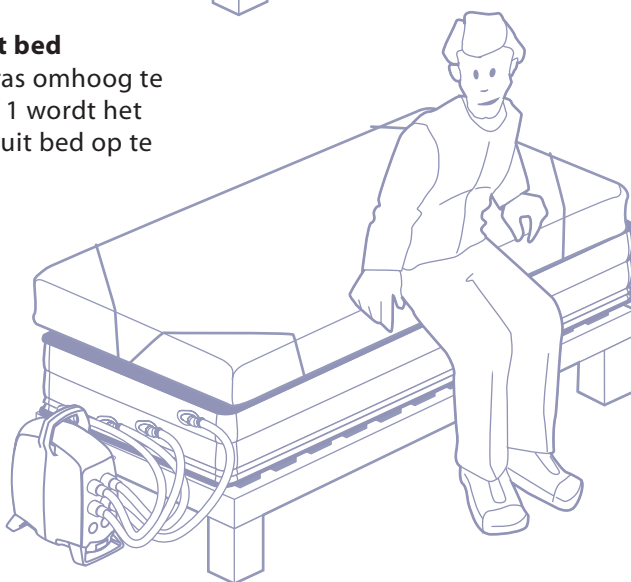

# Gebruik


## Gebruik als opstahulp

Om het opstaan nog gemakkelijker te maken, kunt u op de rand van het bed gaan zitten. Als u de Sprizer verstelt naar laag 2 of 3, wordt u zover opgetild dat u vanzelf opstaat.

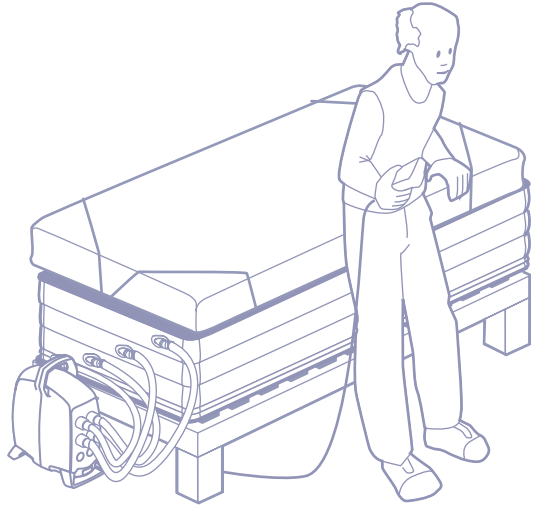


## De transfer

Het maken van een transfer naar een rolstoel wordt vereenvoudigd door de luchtmatras iets hoger te brengen dan het zitvlak van de rolstoel.

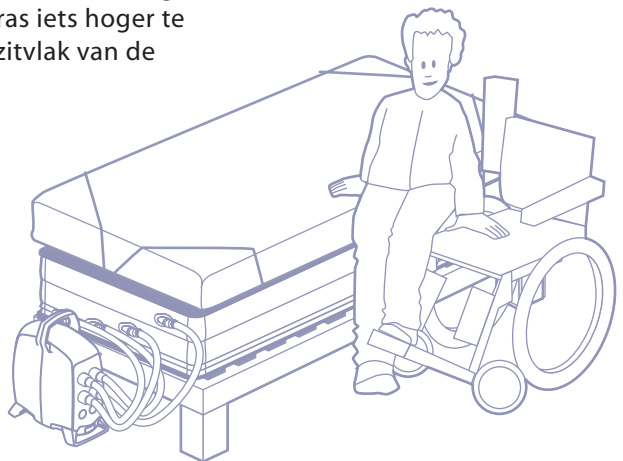


## Opbergen en Transport

1. Laat de luchtmatras leeglopen door op '0' te drukken.

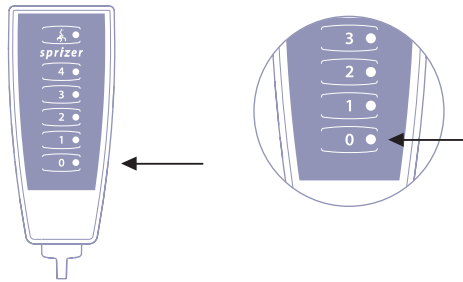

2. Zet de pomp uit middels de aan/uit schakelaar.


3. Ontkoppel de slangen (zie blz 6) en berg deze op in de klep van de rugzak. Rits de klep dicht.

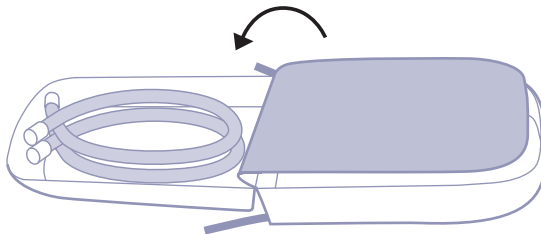

4. Haal de matras van de luchtmatras.


# Opbergen en Transport

5. Vouw de luchtmatras als volgt op.

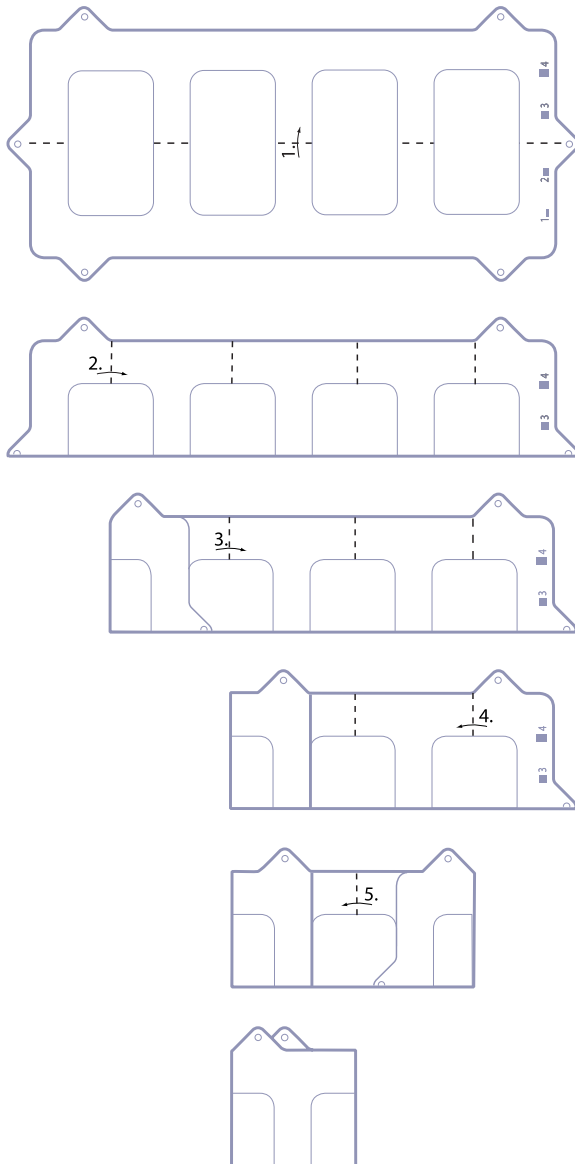


## Opbergen en Transport

6. Plaats de opgevouwen luchtmatras in de rugzak.

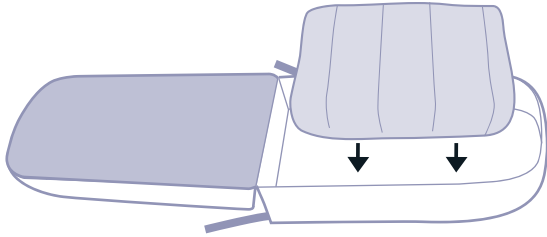

7. Plaats de pomp, de afstandsbediening en het netsnoer in de draagtas. Vergeet deze handleiding niet in de draagtas te stoppen.

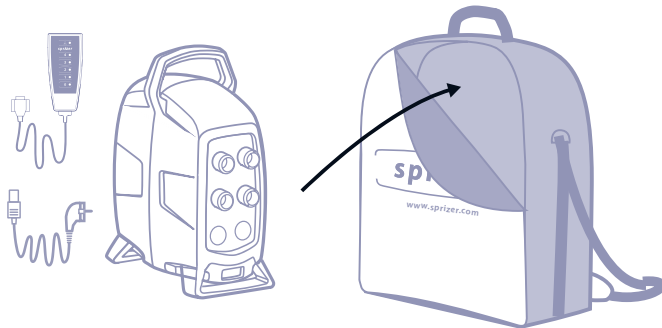

## Onderhoud en Problemen

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
Tijdens service en/of reparatie werkzaamheden moet de stekker uit het stopcontact gehaald zijn.

Het kan gebeuren dat het geheugen van de Sprizer ontregeld raakt. Bijvoorbeeld doordat een slang losraakt van de pomp. De lampjes op de afstandsbediening gaan dan knipperen.

U kunt in dat geval de elektronica resetten d.m.v. de aan/uit schakelaar. Nadat alle lampjes zijn uitgegaan kunt u de Sprizer weer inschakelen.

Als de matras lek raakt, kunt u contact opnemen met de organisatie die u de Sprizer heeft geleverd. Zij zorgen dan voor een nieuwe luchtmatras.

De Sprizer is zo ontworpen dat geen onderhoud nodig is. Wanneer binnen de garantieperiode technische problemen ontstaan met de pompunit, wordt deze unit door Arion International B.V. vervangen. Het oude product wordt daarbij ingenomen door Arion International B.V. Neem bij storingen contact op met uw leverancier.



## Technische gegevens

Voltage	230 V~/50Hz
Vermogen	1100 Watt
Beschermingsgraad	IP44
Electrische isolatieklasse	II
Maximale belasting	175 Kg
Dimensies:	
Pomp	420*320*170 mm
Luchtmatras (vol)	1800*800*450mm
Slangen	6x 1300*25 mm
Afstandsbediening	150*60*25 mm
Elektriciteitsnoer	2,5 m



De Sprizer is getest en  
voldoet aan de eisen voor  
het CE keurmerk voor een  
klasse I medisch product.



[www.sprizer.com](http://www.sprizer.com)